

WATMIND Corona Laientest im praktischen 5er Pack Ideal für Mitarbeiter Testpflicht

einfache Probenentnahme als Speichel / Lutsch / Lolly Testmethode im Mundraum

NEU: Verpackung inklusive praktischer Probenhaltung

Dieser SARS-CoV-2 Selbsttest wird nur mittels Speichelentnahme unter der Zunge (Mundraum) und nicht aus dem Nasen-Rachen-Raum durchgeführt. Damit ist die Probenentnahme weniger invasiv, kein tiefes Eindringen in den Nasen-Rachenraum mehr notwendig und für Sie angenehmer, schonender und einfacher. Dieser Schnelltest wird häufig auch als Lutschtest für Kinder verwendet.

HINWEIS: Dieser Test ist nach der Coronavirus-Testverordnung beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte gelistet und somit erstattungsfähig.

Lolli-Test:

Bei der Lollipop Corona Testmethode im Mundraum handelt es sich um eine nicht-invasive und damit kinderleichte Probenentnahme, die einen sensitiven Nachweis von SARS-CoV-2 ermöglicht. Anstatt Speichel auszuspucken, braucht man beim Lolly Test nur einen Tupfer für 10 Sekunden unter die Zunge legen, 5 mal drehen und den Tupfer dadurch mit Speichel tränken. So einfach und angenehm ist die Proben bzw. Speichelprobenentnahme abgeschlossen.

Eigenschaften:

- Probenentnahme: Speichel (Lolly-Test)
- Assay Typ: Lateral Flow PoC Test
- Sensitivität: 95,51 % (≤ 7 Tage nach Einsetzen der Symptome)
- Spezifität: 99,45 %
- Empfindlich bei hoher Viruslast
- Einfach anzuwenden: Schnelle und zuverlässige Testergebnisse in nur 15 Minuten
- Dauer: ca. 15 Minuten
- Lagertemperatur: 4 - 30°C

Zulassungen:

- BfArM gelistet (BfArM-AT-Nummer: AT108/20)
- PEI Evaluierung
- als Laientest zugelassen ! (Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM: 5640-S-032/21)

Mengenanfragen:

Bei größeren Bestellmengen durch Schulen, Kindergärten, Verbände, Institute usw. wenden Sie sich bitte direkt an:

infektionsschutz@brodschelm.net oder Tel. 089 50005555

HINWEIS: Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen und kann nicht zurückgenommen werden. Wir bitten um Ihr Verständnis



Vorbereitung

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest zur Eigenanwendung (kolloidales Gold)

(Speichelproben)

Kurzanleitung



Vorbereitung

1. Öffnen Sie Ihre Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt.
2. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie den Test durchführen.

Material:

- Testgeräte
- Salzsäure
- Salzwasser
- Kontrolllösung

Kurzanleitung

1. Öffnen Sie den Beutel und legen Sie die Kassette auf eine saubere, trockene, flache Oberfläche. **WICHTIG:** Berühren Sie keine Teile auf der Innenseite der Karte.

Probenentnahme

Schritt 1. Ablauf der Probenentnahme

1. Entfernen Sie die Testpackung und nehmen Sie den Testler heraus.
2. Entleeren von Speichelproben: Drücken Sie die Zungenspitze gegen die urbane Membran, um den Speichel auszuwaschen. Bringen Sie den Oropharynxspiegel für 10 Sekunden über die Zunge, ziehen Sie ihn 5 Mal und lassen Sie ihn vollständig.

Schritt 2. Probenextraktion

1. Öffnen Sie den äußeren Deckel des Röhrchens, das mit Probenentnahmevorrichtung versehen ist.
 2. Füllen Sie das Testler in das Probenröhrchen und besetzen Sie anschließend den Testlerkopf vollständig in die Probe ein.
 3. Mischen Sie die Lösung, indem Sie den Testler mindestens 10 Mal kräftig gegen die Seite des Röhrchens ziehen und das Röhrchen 5 Mal von Hand zusammenpressen, damit die Probe auf dem Testler vollständig in dem Extraktionspuffer gelöst wird.
-

Testverfahren

Schritt 3. Testverfahren

1. Kleben Sie das Testlerkopf ab und heben Sie ihn in dem Röhrchen.
2. Warten Sie 15 Minuten.
3. Öffnen Sie die obere Abdeckung des Röhrchens.

4. Kleben Sie die untere Abdeckung des Röhrchens ab und heben Sie sie in dem Röhrchen.

5. Schließen Sie die untere Abdeckung des Röhrchens ab und schwenken Sie das Röhrchen 5-6 Mal.

HINWEIS: Die Kassette darf während dieser Zeit nicht bewegt und/oder berührt werden.

Auswertung

Schritt 4. Auswertung der Testergebnisse

1. Interpretieren Sie die Testergebnisse nach 15-20 Minuten.

Positiv

Negativ

Ungültig

Ein ungültiges Testergebnis tritt ein, wenn kein Testergebnis vorliegt. Wiederholen Sie den Test. Sie sollten sich an einen Arzt wenden, wenn Sie die folgenden Symptome haben: Fieber, Husten, Schnupfen, Halsentzündung, Atemnot, Verlust des Geschmacks oder Geruchs. Ein Testergebnis sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Diagnose von COVID-19 verwendet werden. Die Möglichkeit eines falsch positiven Ergebnisses kann nicht ausgeschlossen werden. Wenn Sie ein negatives Ergebnis erhalten, aber weiterhin Symptome der COVID-19-Pandemie aufweisen, sollten Sie sich an einen Arzt wenden. Ein negatives Ergebnis kann auch ein negatives Ergebnis sein, wenn Sie sich in der Inkubationszeit befinden. Ein negatives Ergebnis kann auch ein negatives Ergebnis sein, wenn Sie sich in der Inkubationszeit befinden.

Symbole

	Verwendet werden		Kein Verwenden
	Verwendet werden		Kein Verwenden
	Verwendet werden		Kein Verwenden
	Verwendet werden		Kein Verwenden
	Verwendet werden		Kein Verwenden